

Phonak RemoteControl

Lietošanas instrukcija



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Phonak RemoteControl!

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai saprastu, kā lietot tāl vadības pulti un maksimāli efektīvi izmantot tās sniegtās iespējas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par funkcijām un priekšrocībām, sazinieties ar savu dzirdes speciālistu.



Saderības informācija

Pārbaudiet savu dzirdes aparātu saderību, sazinoties ar dzirdes speciālistu.

Phonak — life is on
www.phonak.com




CE marķējuma gads: 2020

1. Apraksts	6	6. Informācija par atbilstību	16
2. Phonak RemoteControl lietošana	7	7. Informācija un simbolu apraksti	24
2.1. Phonak RemoteControl aktivizēšana	7	8. Svarīga informācija par drošību	28
2.2. Ieslēgšana/izslēgšana	7	8.1. Brīdinājumi par riskiem	28
2.3. Gaismas indikatora skaidrojums	7	8.2. Informācija par produkta drošumu	31
2.4. Phonak RemoteControl un dzirdes aparātu savienošana pāri	8	8.3. Cita svarīga informācija	33
2.5. Dzirdes aparātu skaļuma maiņa	10	9. Apkope un uzturēšana	34
2.6. Dzirdes aparātu programmas maiņa	10	10. Remonts un garantija	35
3. Jaunas baterijas ievietošana	11	10.1. Vietējā garantija	35
3.1. Atveriet baterijas nodalījumu	11	10.2. Starptautiskā garantija	35
3.2. Izņemiet bateriju no baterijas nodalījuma	11	10.3. Garantijas ierobežojums	36
3.3. Ievietojiet jaunu bateriju	11		
3.4. Aizveriet baterijas nodalījumu	12		
4. Phonak RemoteControl atiestate	13		
5. Problēmu novēršana	14		

1. Apraksts


Ar Phonak RemoteControl jūs varat mainīt sava dzirdes aparāta programmas un skaļumu.

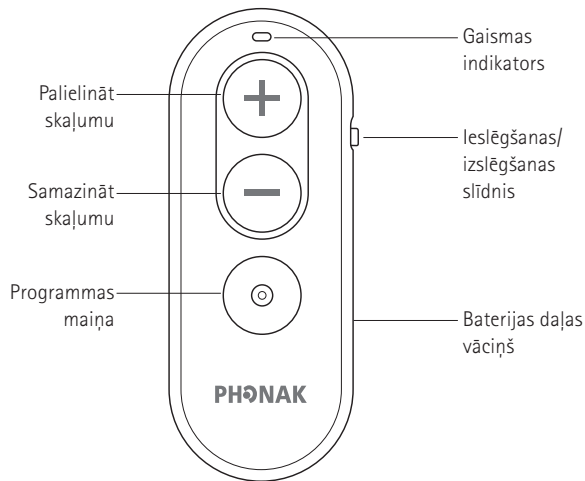

2. Phonak RemoteControl lietošana


2.1. Phonak RemoteControl aktivizēšana

Izvelciet baterijas aizsardzības lapiņu, lai ieslēgtu Phonak RemoteControl.

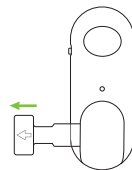

2.2. Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšanai un izslēgšanai izmantojiet slīdni.

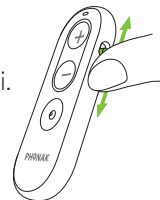

2.3. Gaismas indikatora skaidrojums

3 sekundes deg zaļā krāsā		Ieslēgta, gatava lietošanai
Mirgo zilā krāsā		Savienošanas pāri režīms
5 sekundes deg zaļā krāsā		Savienots pāri
5 sekundes deg sarkanā krāsā		Nesekmīga savienošana pāri krāsā
1 sekundi deg zaļā krāsā		Spiedpogas nospiešanas apstiprinājums
Deg oranžā krāsā		Baterijas brīdinājums
Deg sarkanā krāsā		Vispārīga ierīces kļūda
3 sekundes deg zaļā krāsā		Sekmīga atiestatīšana


2.4. Phonak RemoteControl un dzirdes aparātu savienošana pārī

Lai izmantotu Phonak RemoteControl kopā ar dzirdes aparātiem, savienojiet tos atbilstoši šādiem norādījumiem.

① Lai nodrošinātu ideālu savienojumu, pārliecinieties, ka atrodaties vietā, kur ir pēc iespējas mazāk citu aktīvu Bluetooth ierīču.

① Dzirdes aparātu savienošana pārī jāveic tikai vienreiz. Pēc sākotnējās savienošanas pārī Phonak RemoteControl automātiski izveidos savienojumu ar dzirdes aparātiem.

1. Izslēdziet savus dzirdes aparātus un pēc tam atkal ieslēdziet. Tas iestatīs tos savienošanas pārī režīmā uz laiku līdz 3 minūtēm. Novietojiet tos uz virsmas tā, lai tie atrastos 15 cm attālumā no Phonak RemoteControl.
2. Pārliecinieties, ka Phonak RemoteControl ir izslēgts.
3. Nospiediet un turiet nospiestu skaļuma palielināšanas pogu „+” un ieslēdziet Phonak RemoteControl.

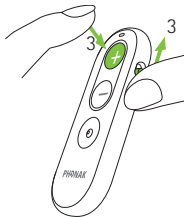

4. Kad gaismas indikators sāk mirgot zilā krāsā, atļaidiet skaļuma palielināšanas pogu „+”. Tas norāda, ka Phonak RemoteControl tagad ir savienošanas pārī režīmā.
5. Starp Phonak RemoteControl un dzirdes aparātiem tagad tiks automātiski izveidots savienojums.
6. Pēc veiksmīgas savienošanas gaismas indikators 5 sekundes degs zaļā krāsā. Tagad varat lietot Phonak RemoteControl.

① Ja gaismas indikators atkal sāk mirgot zilā krāsā un jūs lietojat divus dzirdes aparātus: Phonak RemoteControl joprojām atrodas pārī savienošanas režīmā un mēģina izveidot savienojumu ar otru dzirdes aparātu. Pēc veiksmīgas savienošanas gaismas indikators 5 sekundes degs zaļā krāsā. Tagad varat lietot Phonak RemoteControl.

① Ja gaismas indikators atkal sāk mirgot zilā krāsā un jūs lietojat tikai vienu dzirdes aparātu: nospiediet skaļuma samazināšanas pogu „-” uz Phonak RemoteControl, lai manuāli izietu no pārī savienošanas režīma.

① Ja savienošana neizdodas, meklējiet iespējamo risinājumu sadaļā Problēmu novēršana (5. nodaļa).

2.5. Dzirdes aparātu skaļuma maiņa


Nospiediet "+", lai palielinātu skaļumu

Nospiediet "-", lai samazinātu skaļumu



2.6. Dzirdes aparātu programmas maiņa

Katru reizi nospiežot programmu pogu, dzirdes aparāti pārslēgsies uz nākamo pieejamo programmu.

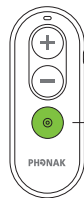

Nospiediet, lai mainītu dzirdes aparātu programmu.


① Dzirdes aparātos atkarībā no dzirdes aparātu konfigurācijas var būt dzirdams izvēles apstiprinājuma skaņas signāls.

① Izmaiņas tiek lietotas abiem dzirdes aparātiem vienlaikus.


① Lai saņemtu informāciju par individuālajiem iestatījumiem, sazinieties ar dzirdes speciālistu un palūdziet izdrukāt Phonak RemoteControl norādījumus.

3. Jaunas baterijas ievietošana


3.1. Atveriet baterijas nodalījumu

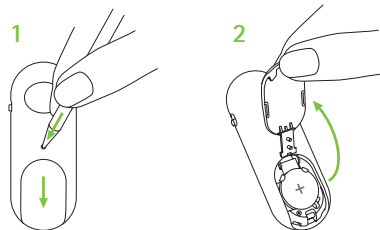

3.2. Izņemiet bateriju no baterijas nodalījuma

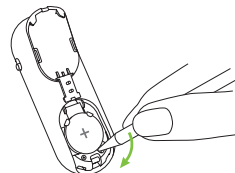


3.3. Ievietojiet jaunu bateriju

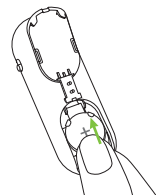

① Pultī Phonak RemoteControl jāievieto litija podziņelements (CR2032)

3.4. Aizveriet baterijas nodalījumu

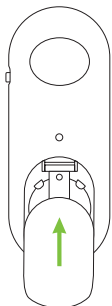

- ① Glabājiet baterijas bērniem, personām ar garīgo spēju traucējumiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Šai ierīcei tiek izmantoti litija podziņelementi. Ja šīs baterijas tiek norītas, tās ir ļoti bīstamas. Norīšana var izraisīt nopietnu traumu jau 2 stundu laikā vai izraisīt nāvi ķīmisku apdegumu un iespējamās barības vada perforācijas dēļ.
 - Ja jums ir aizdomas par baterijas norīšanu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu!
 - Pēc baterijas maiņas nodrošiniet, lai ierīces baterijas nodalījums būtu cieši aizvērts. Neatstājiet izlietotas baterijas bez uzraudzības un nekavējoties utilizējiet tās drošā vietā. Izlietotas baterijas var būt vēl bīstamas.

4. Phonak RemoteControl atiestate

① Phonak RemoteControl atiestate atceļ dzirdes aparātu pāra savienojumu.

Vairāk nekā 10 sekundes turiet nospiestu skaļuma palielināšanas pogu "+" un programmas maiņas pogu.

5. Problēmu novēršana

Problēma

Savienošana pāri ar dzirdes aparātiem nav veiksmīga

Nospiežot pogu, neiedegas gaismas indikators

Dzirdes aparāti nereaģē uz RemoteControl komandām

Deg sarkanas krāsas indikators

Cēloņi

Aktīvās Bluetooth ierīces var radīt traucējumus

Tālvadības pults ir izslēgta

Tukša baterija

Dzirdes aparāti ir izslēgti

Dzirdes aparāti nav savienoti pāri ar RemoteControl

Tālvadības pults ir izslēgta

Tukša baterija

Vispārīga ierīces kļūda

Veicamās darbības

Pārejiet uz vietu, kur ir pēc iespējas mazāk aktīvu Bluetooth ierīču, un mēģiniet vēlreiz (2.4. nodaļa).

Ieslēdziet tālvadības pulti (2.2. nodaļa)

Nomainiet bateriju (3. nodaļa)

Ieslēdziet dzirdes aparātus (skatiet dzirdes aparātu lietošanas instrukciju)

Savienojiet pāri ar RemoteControl (2.4. nodaļa)

Ieslēdziet tālvadības pulti (2.2. nodaļa)

Nomainiet bateriju (3. nodaļa)

Atiestatiet RemoteControl (4. nodaļa) un savienojiet pāri dzirdes aparātus (2.4. nodaļa)

❗ Ja problēma joprojām pastāv, lūdziet palīdzību savam dzirdes speciālistam.

6. Informācija par atbilstību

Atbilstības deklarācija

Ar šo Phonak AG apliecina, ka šis Phonak izstrādājums atbilst Medicīnas ierīču regulas (ES) 2017/745, kā arī Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām. Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var saņemt no ražotāja vai vietējā Phonak pārstāvja, kura adrese ir norādīta vietnē www.phonak.com/en-int/certificates (Phonak atrašanās vietas visā pasaulē).

Austrālija/Jaunzēlande



R-NZ

Norāda, ka ierīce atbilst attiecīgajām Radiofrekvenču spektra pārvaldības (RSM) un Austrālijas Komunikāciju un mediju pārvaldes (ACMA) normatīvajām prasībām, lai to drīkstētu pārdot Jaunzēlandē un Austrālijā. Atbilstības etiķete R-NZ ir paredzēta radioierīču produktiem, kas tiek piegādāti Jaunzēlandes tirgū saskaņā ar atbilstības līmeņa A1 prasībām.

Šis modelis ir sertificēts saskaņā ar tālāk norādīto.

Phonak RemoteControl

ASV FCC ID: KWC-RC1

Kanāda IC: 2262A-RC1

1. piezīme.

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission – FCC) noteikumu 15. daļai un Kanādas Rūpniecības departamenta standartam RSS-210. Uz ekspluatāciju attiecas šādi divi nosacījumi:

- 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
- 2) šai ierīcei ir jāiztur visi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

2. piezīme.

Ja šī ierīce RemoteControl ir pārveidota un to nav tieši apstiprinājis uzņēmums Phonak, FCC sniegtā šīs ierīces lietošanas atļauja var tikt anulēta.

3. piezīme.

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces prasībām, ko nosaka FCC noteikumu 15. daļa un Kanādas Rūpniecības departamenta standarts ICES-003.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt nopietnus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nevar garantēt, ka noteiktos apstākļos traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce izraisa nopietnus radio vai televīzijas signālu uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst radušos traucējumus, veicot kādu no tālāk norādītajiem pasākumiem.

- Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citai barošanas kontaktligzdai, kas nav ķēdē, kurai pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

4. piezīme.

Atbilstība Japānas Radio likumam un Japānas Telekomunikācijas uzņēmējdarbības likumam

Šī ierīce atbilst Japānas Radio likumam (電波法) un Japānas Telekomunikācijas uzņēmējdarbības likumam (電気通信事業法). Šo ierīci nedrīkst pārveidot (pretējā gadījumā piešķirtais apzīmējuma numurs kļūst nederīgs).



018-190129

Jūsu bezvadu ierīces radio informācija

Antenas tips	Viena pola antena
Eksploatācijas frekvence	2,4–2,48 GHz
Modulācija	GFSK
Starojuma jauda	< 2,8 mW
Bluetooth®	
Diapazons	~1m
Bluetooth	4.2
Atbalstītie profili	BLE (GATT)

Atbilstība emisijas un noturības standartiem

Emisijas standarti	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Noturības standarti	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

Par ikvienu nopietnu starpgadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, jāziņo ražotāja pārstāvim un atbildīgajai mītnes valsts iestādei. Par nopietnu starpgadījumu tiek uzskatīts ikviens starpgadījums, kas tieši vai netieši izraisījis, varētu būt izraisījis vai varētu izraisīt kādu no šiem faktoriem:

- pacienta, lietotāja vai citas personas nāve;
- pacienta, lietotāja vai citas personas veselības stāvokļa īslaicīga vai neatgriezeniska nopietna pasliktināšanās;
- nopietns sabiedriskās veselības apdraudējums.

Lai ziņotu par neparedzētu darbību vai notikumu, sazinieties ar ražotāju vai pārstāvi.

Ja ierīci Phonak RemoteControl rūpīgi un regulāri kopsit, tā teicami darbosies un ilgi kalpos. Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku, Sonova AG piedāvā vismaz piecu gadu apkopes periodu pēc attiecīgā produkta ražošanas izbeigšanas.

Lai saņemtu papildinformāciju par savu piederumu funkcijām, priekšrocībām, lietošanu un apkopi vai remontu, sazinieties ar dzirdes speciālistu vai ražotāja pārstāvi.

Papildinformācija ir pieejama jūsu produkta datu lapā.

Lai saņemtu jebkādu informāciju par dzirdes aparātu piederumu remonta pakalpojumiem, sazinieties ar dzirdes speciālistu.

Paredzētais lietojums: tālvadības pults Phonak RemoteControl ir paredzēta, lai mainītu dzirdes aparātu programmas un skaļuma līmeni.

Indikācija: vājdzirdība un dzirdes aparāti ar individuālu pielāgošanu, kas ir saderīga ar Phonak RemoteControl.

Kontrindikācija: nav.

Mērķa populācija: mērķa grupa ir vājdzirdīgi cilvēki, kas izmanto saderīgus Phonak dzirdes aparātus. Nav ierobežojumu attiecībā uz vājdzirdības līmeni.

Phonak RemoteControl ir piemērota veselības aprūpei mājās, kā arī pārnēsājamības dēļ to var izmantot profesionālās veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu praksēs, zobārstniecības praksēs utt.

7. Informācija un simbolu apraksti



Ar CE simbolu Sonova AG apliecina, ka šis produkts – ieskaitot piederumus – atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā par medicīnas ierīcēm (ES) 2017/745, kā arī Direktīvā par radioiekārtām 2014/53/ES. Cipari pēc CE simbola atbilst to sertificēto iestāžu kodam, kas ir sniegušas novērtējumu atbilstoši iepriekš minētajām direktīvām.



Šis simbols norāda, ka šajā lietotāja instrukcijā raksturotie produkti atbilst standarta EN 60601-1 prasībām, kas attiecas uz B tipa pacientam izmantojamo daļu. Dzirdes aparāta virsma ir norādīta kā B tipa ierīces izmantojamā daļa.



Norāda medicīnas ierīces ražotāju saskaņā ar ES Regulu par medicīnas ierīcēm (ES) 2017/745.



Norāda medicīnas ierīces izgatavošanas datumu.



Norāda pilnvaroto pārstāvi Eiropas Savienībā. ES REP ir arī importētājs Eiropas Savienībā.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi izlasīt un ievērot attiecīgo informāciju, kas sniegta šajā lietošanas instrukcijā.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi pievērst uzmanību attiecīgajiem šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem brīdinājuma ziņojumiem.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi pievērst uzmanību attiecīgajiem šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem brīdinājumu ziņojumiem saistībā ar baterijām



Svarīga informācija par lietošanu un produkta drošumu.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi izlasīt un ievērot attiecīgo šajā lietošanas instrukcijā sniegto informāciju.



Šis simbols norāda, ka ierīces radītie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz ierobežojumus, ko ir apstiprinājusi ASV Federālā sakaru komisija.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda Sonova AG šādu zīmju lietošana ir saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.



Japānas apzīmējums, ko piešķir sertificētam radioaprīkojumam.



Norāda ražotāja sērijas numuru, lai varētu identificēt konkrētu medicīnisko ierīci.



Norāda, ka ierīce ir medicīniskā ierīce.



Norāda ražotāja kataloga numuru, lai varētu identificēt šo medicīnisko ierīci.



Temperatūra transportēšanas un glabāšanas laikā: no -20° līdz $+60^{\circ}$ pēc Celsija (no -4° līdz $+140^{\circ}$ pēc Fārenheita).
Ekspluatācijas temperatūra: no 0° līdz $+40^{\circ}$ pēc Celsija (no $+32^{\circ}$ līdz $+104^{\circ}$ pēc Fārenheita).



Mitrums glabāšanas laikā: no 0 % līdz 70 %, ja ierīce netiek lietota.



Atmosfēras spiediens ekspluatācijas, transportēšanas un glabāšanas laikā: no 500 hPa līdz 1060 hPa



Transportēšanas laikā sargājiet no mitruma.



Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni norāda, ka šo dzirdes aparātu, kā arī lādētāju nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Atbrīvojieties no vecajiem vai nelielotajiem dzirdes aparātiem un lādētāja elektronisko atkritumu savākšanas vietās vai atdodiet dzirdes aparātu un lādētāju savam dzirdes speciālistam, kurš no tā atbrīvosies. Pareizi atbrīvojoties, tiek saudzēta apkārtējā vide un veselība.

8. Svarīga informācija par drošību

Pirms ierīces lietošanas izlasiet turpmākajās lappusēs sniegto informāciju

8.1. Brīdinājumi par riskiem

-  Jūsu ierīce darbojas 2,4–2,48 GHz frekvencēs. Pirms iekāpšanas lidmašīnā noskaidrojiet, vai lidojumu pakalpojumu sniedzējs pieprasa izslēgt ierīces.
-  Glabājiet šo ierīci bērniem līdz 3 gadu vecumam, personām ar garīgiem traucējumiem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
-  Šī tālvadības pults saziņai ar dzirdes aparātiem lieto digitāli kodētu nelielas jaudas raidītāju. Kaut arī nenozīmīga, tomēr pastāv iespēja, ka šīs ierīces darbība var traucēt medicīnisko ierīču (piemēram, elektrokardiosimulatoru, defibrilatoru un citu ierīču) darbību. Tādēļ lietotāji nedrīkst turēt šo tālvadības pulti krūšu kabatā vai tuvu tai.
-  Nav atļauts veikt ierīces izmaiņas vai pārveidošanu bez tiešas Sonova atļaujas. Šādas izmaiņas var bojāt ierīci.

-  Ja rodas problēmas, kuras nevar novērst, veicot šīs lietošanas instrukcijas problēmu novēršanas sadaļā aprakstītās darbības, sazinieties ar dzirdes speciālistu.
-  Šī ierīce nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Šīs ierīces lietošana bērniem un personām ar garīgās attīstības traucējumiem ir pastāvīgi jāuzrauga, lai garantētu šo personu drošību. Šī ir maza ierīce, un tajā ietilpst mazas daļas. Neatstājiet pie šīs ierīces bez uzraudzības bērnus un personas ar garīgās attīstības traucējumiem. Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, jo ierīce vai tās daļas var izraisīt smakšanu!
-  Šī aprīkojuma izmantošana blakus citam aprīkojumam vai kopā ar to nav ieteicama, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja šāda izmantošana ir nepieciešama, šis un cits aprīkojums ir jānovēro, lai pārliecinātos par normālu darbību.
-  Ja ierīci ilgstoši neizmantos, izņemiet tās bateriju.

 Nelietojiet ierīci sprādzienbīstamās vietās (ugunsnedroši anestēzijas līdzekļi, raktuvēs vai industriālās teritorijās, kurās pastāv sprādziena risks) ar skābekli piesātinātā vidē vai vietās, kur aizliegts izmantot elektronisko aprīkojumu.

 Citu piederumu, pārveidotāju un kabeļu lietošana (neattiecas uz šī aprīkojuma ražotāja norādītajiem un nodrošinātajiem piederumiem) var palielināt elektromagnētisko emisiju vai samazināt šī aprīkojuma elektromagnētisko noturību un galu galā izraisīt nepareizu darbību.

 Pārnēsājamo RF sakaru aprīkojumu (tostarp perifērās ierīces, piemēram, antenu kabeļus un ārējās antenas) nedrīkst lietot tuvāk par 30 cm (12 collām) no Phonak RemoteControl daļām, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma darbība.



BRĪDINĀJUMS! Šīs baterijas ir bīstamas un var izraisīt smagas traumas, ja tiek norītas vai nokļūst kādā ķermeņa daļā, neatkarīgi no tā, vai baterija ir lietota vai jauna. Glabājiet vietā, kur tām nevar piekļūt bērni, cilvēki ar kognitīviem traucējumiem vai mājdzīvnieki. Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir norīta vai nokļuvusi kādā ķermeņa daļā, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

8.2. Informācija par produkta drošumu

 Aizsargājiet ierīci pret pārmērīgu mitrumu (vanna vai baseins), siltumu (radiatori, automobiļa mērinstrumentu panelis) vai pret tiešu saskari ar sviedrainu ādu (darbs, fiziski vingrinājumi, sports).

 Nenometiet ierīci. Nokrītot uz cietas virsmas, ierīce var tikt sabojāta.

- ❗ Pareizu ierīces darbību var negatīvi ietekmēt īpašas medicīniskās vai stomatoloģiskās pārbaudes, tostarp zemāk aprakstītais starojums. Izņemiet to un atstājiet to citā telpā/vietā pirms zemāk norādīto pārbažu veikšanas.

- Medicīniskās vai stomatoloģiskās rentgenoloģiskās pārbaudes (arī datortomogrāfija).
- Medicīniskās pārbaudes, veicot MRI/NMRI skenēšanu, kas rada magnētiskos laukus.

- ❗ Sargājiet ierīces ligzdas un baterijas nodalījumu no netīrumiem un gruziem.

- ❗ Šajā ierīcē izmantotā digitāli kodētā pārraides tehnoloģija ir īpaši uzticama un tikpat kā neuztver nekādus traucējumus no citām ierīcēm. Taču, lai nodrošinātu pareizu dzirdes sistēmas darbību, lietojot to datora, lielākas elektroniskās instalācijas vai cita spēcīga elektromagnētiskā lauka tuvumā, lietotājam jāatrodas vismaz 60 cm (24 collu) attālumā no traucējumus izraisošās ierīces.

- ❗ Turiet ierīci vismaz 10 cm attālumā no jebkādu veidu magnētiem.

- ❗ Ja ierīci nelietojat, izslēdziet to un droši uzglabājiet.

- ❗ Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir aizliegts lietot elektronisko aprīkojumu.

8.3. Cita svarīga informācija

- ❗ Lielas jaudas elektroniskais aprīkojums, lielākas elektroniskas instalācijas un metāla konstrukcijas var traucēt ierīces darbību un ievērojami samazināt ierīces darbības diapazonu.

- ❗ Ja dzirdes aparāti nereaģē uz ierīces signāliem neparastu lauka traucējumu dēļ, izvēlieties citu vietu.

9. Apkope un uzturēšana

Ierīces tīrīšana

Tīrīšanai izmantojiet bezplūksnu drānu. Ieteicama sausā tīrīšana. Ja nepieciešams, virsmu var notīrīt ar vieglu ziepjainu ūdeni. Taču drānai jābūt mitrai, un tā nedrīkst pilēt, lai ierīcē neiekļūtu mitrums. Nelietojiet kodīgas vielas, piemēram, šķīdinātājus vai krāsas atšķaidītājus, jo tie var sabojāt virsmu.

10. Remonts un garantija

10.1. Vietējā garantija

Par vietējās garantijas nosacījumiem jautājiēt dzirdes speciālistam, pie kura iegādājāties ierīces.

10.2. Starptautiskā garantija

Sonova nodrošina viena gada ierobežotu starptautisko garantiju, kas ir spēkā, sākot ar iegādes datumu. Šī ierobežotā garantija attiecas uz ražošanas un materiālu defektiem. Garantija ir derīga tikai tad, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments.

Starptautiskā garantija neietekmē jūsu likumīgās tiesības, kas var būt noteiktas vietējā garantijā vai piemērojamajos valsts tiesību aktos attiecībā uz patēriņa preču pārdošanu.

10.3. Garantijas ierobežojums

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai apiešanās, saskares ar ķīmikālijām vai pārmērīgas slodzes dēļ. Trešo personu vai nepilnvarota servisa centra radītu bojājumu gadījumā garantija vairs nav spēkā. Šī garantija neattiecas ne uz kādiem dzirdes speciālista pakalpojumiem, kas sniegti viņa darbvietā.

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums: _____

Pilnvarotais dzirdes speciālists
(zīmogs/paraksts):

Piezīmes

Piezīmes

[illegible]

Piezīmes

[illegible]

Jūsu dzirdes speciālists:



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Vācija



Ražotājs:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Šveice

www.phonak.com

029-0856-91/V3.00/2025-08/NLG © 2020-2025 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

