

Phonak Sky™ L.

Návod na použitie

Phonak Sky L-M/L-M Trial

Phonak Sky L-SP/L-SP Trial





Informácie o načúvacom prístroji

Tento návod na použitie platí pre:

Načúvacie prístroje s bezdrôtovou komunikáciou



Phonak Sky L90-M
Phonak Sky L90-SP
Phonak Sky L70-M
Phonak Sky L70-SP
Phonak Sky L50-M
Phonak Sky L50-SP
Phonak Sky L30-M
Phonak Sky L30-SP
Phonak Sky L-M Trial
Phonak Sky L-SP Trial

① Ak nie je začiarknuté žiadne políčko a nepoznáte označenie modelu svojho načúvacieho prístroja, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov.

Modely načúvacieho prístroja

☐ Sky L-M (L90/L70/L50/L30)	312
☐ Sky L-SP (L90/L70/L50/L30)	13
☐ Sky L-M Trial	312
☐ Sky L-SP Trial	13

Veľkosť batérie

Ušné koncovky

- ☐ Klasická tvarovka
- ☐ Univerzálna koncovka
- ☐ Továrnska koncovka
- ☐ Tvarovka SlimTip



Vaše načúvacie prístroje vyvinula značka Phonak, svetový líder v oblasti posluchovej technológie so sídlom vo švajčiarskom Zürichu.

Tieto prémiové výrobky sú výsledkom desaťročí výskumu a odborných vedomostí a sú navrhnuté so zreteľom na váš užívateľský komfort. Ďakujeme vám za to, že ste sa rozhodli pre náš výrobok a želáme vám mnoho rokov príjemného počúvania. Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste svojej pomôcke porozumeli a vyťažili z nej čo najviac. Manipulácia s pomôckou nevyžaduje školenie. Poskytovateľ načúvacích prístrojov vám počas konzultácie za účelom nastavenia pomôže pomôcku nastaviť podľa vašich osobných preferencií.

Viac informácií o funkciách, výhodách, nastavení, použití, údržbe alebo opravách vášho načúvacieho prístroja a príslušenstva vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov alebo zástupca výrobcu. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste k vášmu výrobku na internetovej stránke www.phonakpro.com.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Váš načúvací prístroj

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Stručný návod | 7 |
| 2. Popis načúvacieho prístroja | 9 |


Návod na použitie načúvacieho prístroja

- | | |
|---|----|
| 3. Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja | 11 |
| 4. Zapnutie/vypnutie | 12 |
| 5. Batérie | 13 |
| 6. Nasadenie načúvacieho prístroja | 17 |
| 7. Zloženie načúvacieho prístroja | 19 |
| 8. Multifunkčné tlačidlo s kontrolkou | 21 |
| 9. Prehľad o konektivitě | 23 |
| 10. Úvodné párovanie | 24 |
| 11. Telefonické hovory | 27 |
| 12. Letový režim | 32 |


Ďalšie informácie	
13.	Prehľad informácií o aplikácii myPhonak Junior 34
14.	Prehľad informácií o technológii Roger™ 35
15.	Počúvanie na verejných miestach 36
16.	Prevádzka 37
17.	Starostlivosť a údržba 39
18.	Výmena ušnej koncovky 42
19.	Výmena filtra proti ušnému mazu pri tvarovke SlimTip 45
20.	Servis a záruka 47
21.	Informácie o zhode 49
22.	Vysvetlivky k použitým symbolom 56
23.	Riešenie problémov 62
24.	Dôležité bezpečnostné informácie 66

1. Stručný návod


Výmena batérií

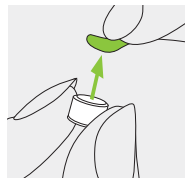

1.
Odstráňte nálepku z novej batérie a počkajte 2 minúty.

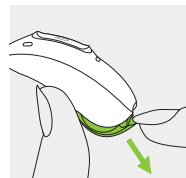


2.
Otvorte dverka priehradky pre batériu. Informácie o zaistenej priehradke pre batériu sú uvedené v kapitole 5.2.

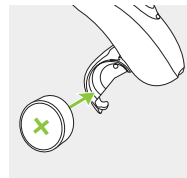


3.
Batériu umiestnite do priehradky pre batériu plochou stranou smerujúcou nahor.

Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja

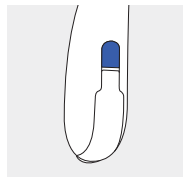


Modrá značka označuje ľavý načúvací prístroj.

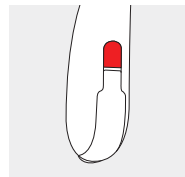


Červená značka označuje pravý načúvací prístroj.

Zapnutie/vypnutie

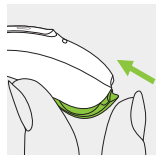

Zapnúť

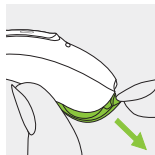


Vypnúť

Informácie o zaistenej priehradke pre batériu sú uvedené v kapitole 5.2.


Multifunkčné tlačidlo s kontrolkou

Toto tlačidlo má niekoľko funkcií. Slúži ako regulátor hlasitosti a/alebo sa používa na zmenu programu v závislosti od naprogramovania načúvacieho prístroja. Je to uvedené v individuálnych „Pokynoch pre váš načúvací prístroj“. Pri spárovaní s telefónom s aktivovanou funkciou Bluetooth® krátkym stlačením prijmete hovor a dlhým stlačením hovor odmietnete. Informácie o kontrolke sú uvedené v kapitole 8.

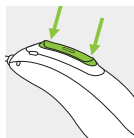

Letový režim

Ak chcete prístroj prepnúť do letového režimu, stlačte dolnú časť tlačidla na 7 sekúnd pri zatvorení priehradky pre batériu. Ak chcete ukončiť letový režim, jednoducho otvorte a znovu zatvorte priehradku pre batériu.

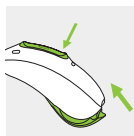

2. Popis načúvacieho prístroja

Na týchto stranách je zobrazený model načúvacieho prístroja a kompatibilné ušné koncovky popísané v tomto návode na použitie.

Vami používaný model rozpoznáte:

- prečítaním si časti „Váš načúvací prístroj“ na strane 3,
- porovnaním svojej koncovky a načúvacieho prístroja s týmito modelmi.

Kompatibilné ušné koncovky



Klasická tvarovka



Univerzálna koncovka




Továrenská koncovka




Tvarovka SlimTip

Sky L s klasickou tvarovkou*

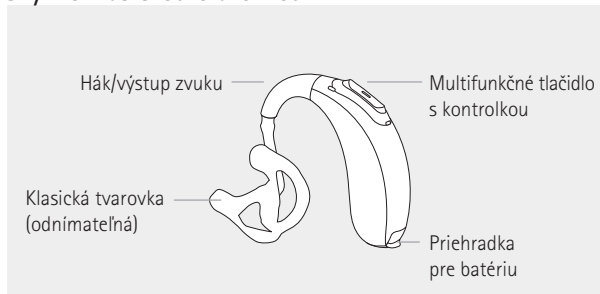


Sky L s továrenskou koncovkou*

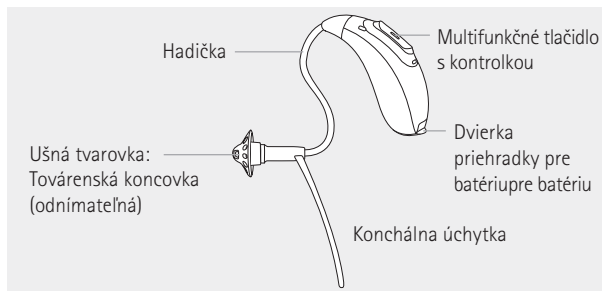


*Dostupné aj s bezpečnostnými prvkami pre deti mladšie ako 36 mesiacov (pozri kapitolu 5.2)

3. Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja

Ľavý a pravý načúvací prístroj sú označené modrou alebo červenou značkou.

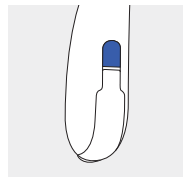



Modrá značka
označuje **ľavý**
načúvací prístroj.

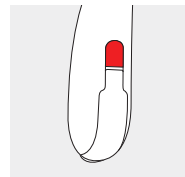

Červená značka
označuje **pravý**
načúvací prístroj.

4. Zapnutie/vypnutie


Dvierka priehradky pre batériu slúži zároveň aj ako vypínač. Informácie o otvorení zaistenej priehradky pre batériu sú uvedené v kapitole 5.2.

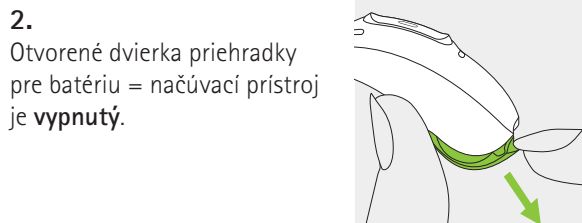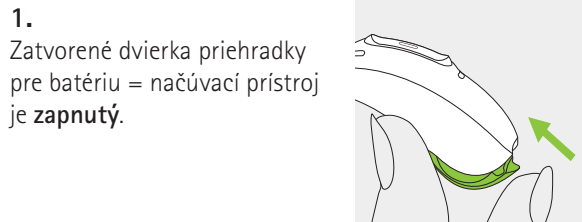

❗ Pri zapnutí načúvacieho prístroja môžete počuť úvodnú melódiu.


5. Batérie

5.1 Vloženie batérie do priehradky so štandardnými dvierkami

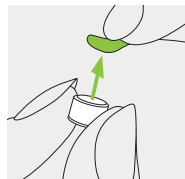


1.

Odstráňte nálepku z novej batérie a počkajte 2 minúty.

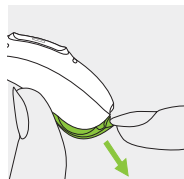

2.

Otvorte dvierka priehradky pre batériu.

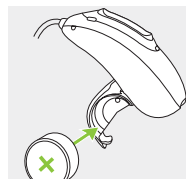

3.

Vložte batériu do priehradky plochou stranou smerujúcou nahor.

❗ Ak máte problém zatvoriť dvierka priehradky pre batériu, skontrolujte, či je batéria vložená správne a či smeruje plochou stranou nahor. Ak nie je batéria vložená správne, načúvací prístroj nebude fungovať a dvierka priehradky pre batériu sa môžu poškodiť. Plochá strana je označená symbolom „+“ buď na nálepke alebo na batérii.

❗ Ak sú namontované bezpečnostné dvierka, pokračujte v čítaní dôležitých informácií nižšie a pozrite si konkrétne pokyny v kapitole 5.2 týkajúce sa vloženia batérie.

 Nízka úroveň výkonu: začujete dve pípnutia a uvidíte nepretržite blikajúce zelené svetlo (ak je aktivované), keď je výkon batérie nízky. Na výmenu batérie máte zvyčajne do 30 minút, avšak tento čas sa môže líšiť a v skutočnosti môže byť podstatne kratší. Odporúčame, aby ste mali vždy poruke náhradnú batériu.

Náhradná batéria

Tento načúvací prístroj vyžaduje na prevádzku zinkovo-vzduchové batérie. Správnu veľkosť batérií (312 alebo 13) určíte:

- prečítaním si časti „Váš načúvací prístroj“ na strane 3,
- skontrolovaním značky na vnútornej strane priehradky pre batériu,
- prečítaním si nasledujúcej tabuľky.

Model	Veľkosť zinkovo-vzduchových batérií	Farebné označenie na balení	Kód IEC	Kód ANSI
Phonak Sky				
L-M/L-M Trial	312	hnedá	PR41	7002ZD
L-SP/L-SP Trial	13	oranžové	PR48	7000ZD

❗ Dbajte na to, aby ste vo svojom načúvacom prístroji vždy používali správny typ batérie (zinkovo-vzduchová). Prečítajte si aj kapitolu 24.2 s ďalšími informáciami o bezpečnosti výrobku.


5.2 Vloženie batérie do priehradky s bezpečnostnými dvierkami

Tento načúvací prístroj je možné vybaviť bezpečnostnou priehradkou pre batériu, ak je to z bezpečnostných dôvodov (potrebné deti mladšie ako 36 mesiacov).

Otvorenie priehradky pre batériu


1.

Vložte hrot nástroja do malého otvoru v dolnej časti načúvacieho prístroja.

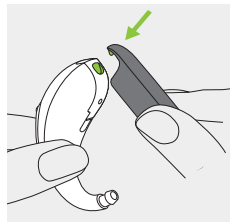

2.


Použite nástroj ako páku na otvorenie priehradky pre batériu silou v smere zelenej šípky.

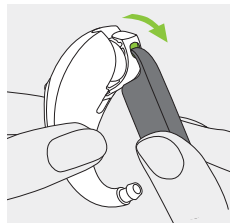

Vloženie batérie


1.

Odstráňte nálepku z novej batérie a počkajte 2 minúty.

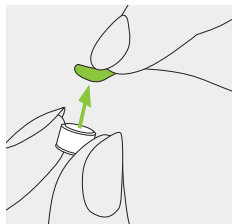


2.

Vložte batériu do priehradky plochou stranou smerujúcou nahor.

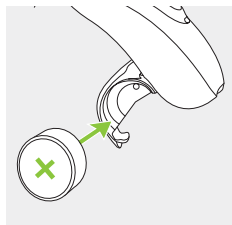

Zatvorenie priehradky pre batériu

Batéria je zaistená iba vtedy, keď je priehradka riadne zatvorená. Po zatvorení vždy skontrolujte, či sa priehradka nedá otvoriť rukou.

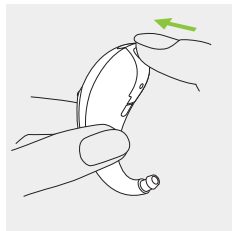


6. Nasadenie načúvacieho prístroja

6.1 Nasadenie načúvacieho prístroja s klasickou tvarovkou


1.

Priložte si tvarovku k uchu a časť určenú pre zvukovod si vložte do zvukovodu.

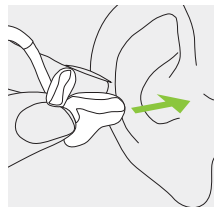


2.

Umiestnite si načúvací prístroj za ucho.

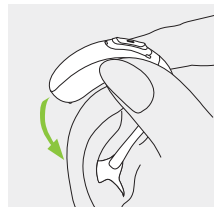

3.


Vložte hornú časť tvarovky do vrchnej časti ušnice.

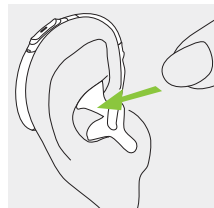

6.2 Nasadenie načúvacieho prístroja s továrenskou koncovkou, tvarovkou SlimTip alebo univerzálnou koncovkou


1.

Umiestnite si načúvací prístroj za ucho.

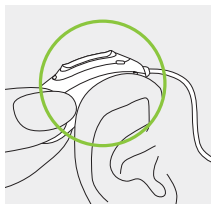


2.

Vložte ušnú koncovku do zvukovodu.

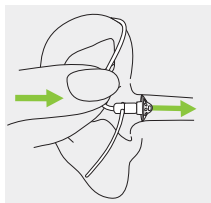

3.

Ak je na ušnej koncovke nasadená konchálna úchytka, načúvací prístroj zaistíte jej zasunutím do priehlbiny ušnice.

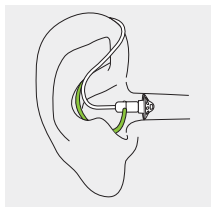


7. Zloženie načúvacieho prístroja

7.1 Zloženie načúvacieho prístroja s klasickou tvarovkou


1.

Zdvihnite načúvací prístroj nad hornú časť vášho ucha.

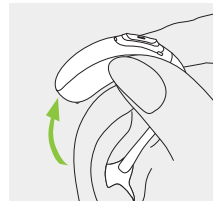

2.

Chyťte tvarovku prstami a opatrne ju vyberte.

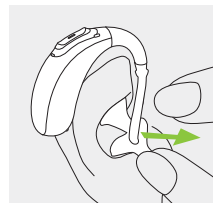


❗ Pri vyberaní načúvacieho prístroja neťahajte za hadičku.

7.2 Vybratie načúvacieho prístroja s továrenskou koncovkou, tvarovkou SlimTip alebo univerzálnou koncovkou

1.


Opatrne potiahnite za ohyb na hadičke a odstráňte načúvací prístroj spoza ucha.

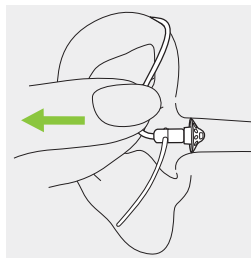

8. Multifunkčné tlačidlo s kontrolkou

Multifunkčné tlačidlo má niekoľko funkcií.

Slúži ako regulátor hlasitosti a/alebo sa používa na zmenu programu v závislosti od naprogramovania načúvacieho prístroja. Je to uvedené v individuálnych „Pokynoch pre váš načúvací prístroj“. Výtlačok vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov.

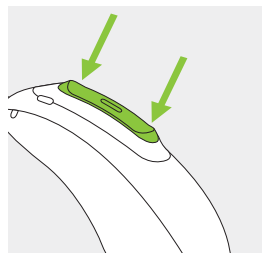

Ak je načúvací prístroj spárovaný s telefónom s aktivovanou funkciou Bluetooth®, krátkym stlačením hornej alebo dolnej časti tlačidla prijmete prichádzajúci hovor a dlhým stlačením ho zamietnete – pozrite si kapitolu 11.

Kontrolka

Kontrolka informuje pacienta a ošetrovateľov mladých detí o stave načúvacieho prístroja. Kontrolka je zabudovaná v multifunkčnom tlačidle a ak je načúvací prístroj zapnutý, ukazuje jeho stav.

9. Prehľad o konektivitě


Váš poskytovateľ načúvacích prístrojov môže kontrolku aktivovať/deaktivovať rôznymi spôsobmi.

Úplný prehľad vzorcov svetelnej indikácie o stave načúvacieho prístroja je uvedený nižšie. Požiadajte svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov, aby označil, čo je aktivované.

Stav načúvacieho prístroja	Vzor kontrolky
☐ Načúvací prístroj je zapnutý	Opakujúce sa jednorazové bliknutie 
☐ Načúvací prístroj je zapnutý a zariadenie Roger™ je dostupné	Opakované dvojité bliknutie 
☐ Takmer vybitá batéria*	Nepretržité blikanie 
☐ Zmena hlasitosti (buď pomocou diaľkového ovládania, aplikácie myPhonak Junior alebo multifunkčného tlačidla)	Jedno bliknutie na zmenu hlasitosti 
☐ Zmena programu (buď pomocou diaľkového ovládania, aplikácie myPhonak Junior alebo multifunkčného tlačidla)	Jedno bliknutie na zmenu programu 

*Upozornenie na takmer vybitú batériu sa zapína pribl. 30 minút pred tým, než je potrebné batériu vymeniť. Odporúča sa, aby ste mali vždy poruke náhradnú batériu.

Ilustrácia nižšie zobrazuje možnosti konektivity dostupné pre váš načúvací prístroj.

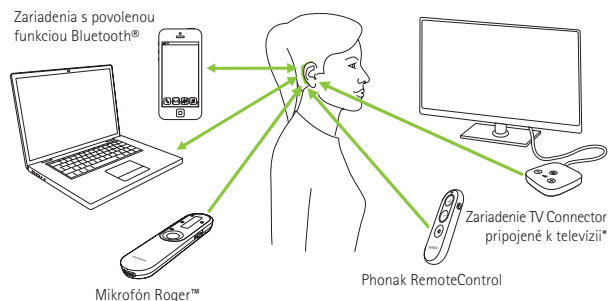

*Zariadenie TV Connector možno pripojiť k akémukoľvek zdroju zvuku, napríklad k televízii, počítaču alebo Hi-Fi systému.


10. Úvodné párovanie

10.1 Úvodné spárovanie so zariadením s povolenou funkciou Bluetooth®

① Spárovanie stačí vykonať iba raz s každým zariadením s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®. Po úvodnom spárovaní sa váš načúvací prístroj bude k zariadeniu pripojovať automaticky. Úvodné párovanie môže trvať až 2 minúty.

1.
V zariadení (napríklad v telefóne) skontrolujte, či je zapnutá bezdrôtová technológia Bluetooth®, a vyhľadajte zariadenia s Bluetooth® v ponuke nastavenia konektivity.

2.
Zapnite oba načúvacie prístroje. Teraz máte 3 minúty na spárovanie načúvacích prístrojov so zariadením.

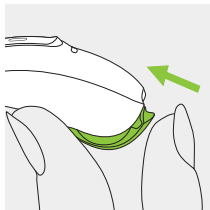

3.

Vaše zariadenie zobrazí zoznam zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth®. Vyberte načúvací prístroj zo zoznamu na simultánne spárovanie oboch načúvacích prístrojov. Úspešné spárovanie bude potvrdené pípnutím.

① Ďalšie informácie a pokyny na párovanie pre bezdrôtovú technológiu Bluetooth® špecifické pre najpopulárnejších výrobcov telefónov nájdete na internetovej stránke:
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>.


10.2 Pripojenie k zariadeniu

Po spárovaní vášho zariadenia sa načúvací prístroj po zapnutí bude k nemu automaticky znova pripájať.

- ① Spojenie bude trvať, kým bude zariadenie zapnuté a v dosahu.
- ① Váš načúvací prístroj sa môže pripojiť až k dvom zariadeniam a spárovať až s ôsmimi zariadeniami.

11. Telefonické hovory

Váš načúvací prístroj umožňuje priamu komunikáciu s telefónmi s aktivovanou funkciou Bluetooth®. Pri párovaní a pripojení k vášmu telefónu budete počuť oznámenia a hlas volajúceho priamo vo svojom načúvacom prístroji. Telefonické hovory sú „hands free“, čo znamená, že mikrofóny načúvacieho prístroja zachytia a prenású váš hlas späť do telefónu.

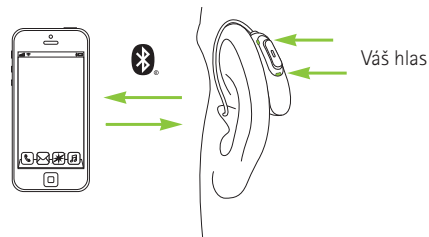


11.1 Vytočenie hovoru

Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo vytáčania.
V načúvacom prístroji budete počuť tón vytáčania.
Mikrofóny vášho načúvacieho prístroja zaznamenajú
váš hlas a prenesú ho do telefónu.

11.2 Prijatie hovoru


Pri prijatí hovoru budete v načúvacom prístroji počuť
oznámenie o prichádzajúcom hovre.

Hovor môžete prijať krátkym stlačením hornej alebo dolnej
časti multifunkčného tlačidla na načúvacom prístroji
(menej ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.

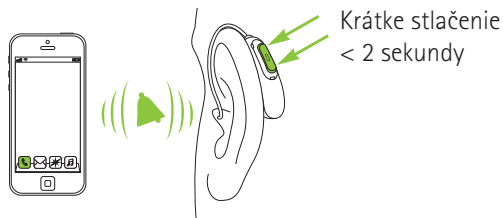


11.3 Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť dlhým stlačením hornej alebo dolnej časti multifunkčného tlačidla na načúvacom prístroji (viac ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.

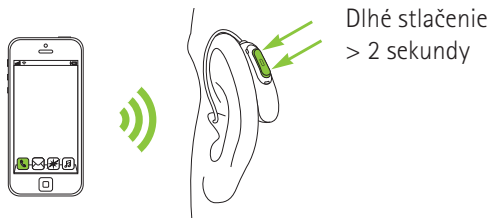

11.4 Odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť dlhým stlačením hornej alebo dolnej časti multifunkčného tlačidla na načúvacom prístroji (viac ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.

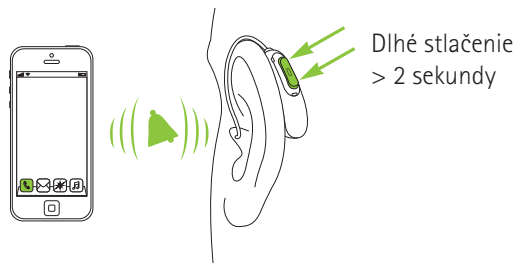

12. Letový režim


Váš načúvací prístroj funguje vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu niektoré letecké spoločnosti vyžadujú, aby boli všetky zariadenia prepnuté do letového režimu. Zapnutie letového režimu nepreruší normálne fungovanie načúvacieho prístroja, vypne sa iba funkcia jeho konektivity Bluetooth®.

12.1 Zapnutie letového režimu

Vypnutie bezdrôtovej funkcie a zapnutie letového režimu na každom načúvacom prístroji:


1.

Otvorte dvierka priehradky pre batériu. Informácie o bezpečnostných dvierkach priehradky pre batériu sú uvedené v kapitole 5.2.

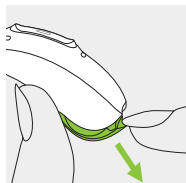

2.

Podržte stlačenú dolnú časť multifunkčného tlačidla na načúvacom prístroji na 7 sekúnd pri zatváraní dvierok priehradky.

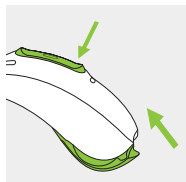


V letovom režime sa váš načúvací prístroj nemôže priamo pripojiť k telefónu.

12.2 Vypnutie letového režimu

Zapnutie bezdrôtovej funkcie a vypnutie letového režimu na každom načúvacom prístroji:


1.

Otvorte dvierka priehradky pre batériu. Informácie o bezpečnostných dvierkach priehradky pre batériu sú uvedené v kapitole 5.2.

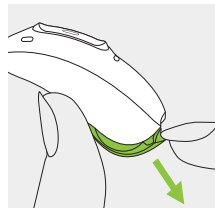

2.

Znovu zatvorte dvierka priehradky.

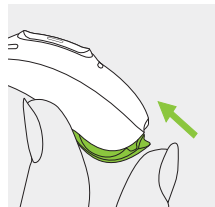

13. Prehľad informácií o aplikácii myPhonak Junior

Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii myPhonak Junior, navštívte internetovú stránku **www.phonak.com/junior-ug** alebo naskenujte QR kód.



Na inštaláciu aplikácie myPhonak Junior naskenujte QR kód.



14. Prehľad informácií o technológii Roger™

Vyskúšajte si počúvanie so zariadením Roger™

Roger™ je inteligentná bezdrôtová technológia, ktorá prenáša reč priamo do načúvacích prístrojov a pomáha tak prekonať vzdialenosť a hluk. Vzdialený mikrofón zachytí hlas hovoriaceho a bezdrôtovo ho prenesie priamo do prijímačov Roger™* vo vašom načúvacom prístroji. Takto sa môžete úplne zapojiť do skupinovej konverzácie dokonca aj vo veľmi hlučných prostrediach, ako napríklad v reštaurácii, na pracovných poradách a pri aktivitách v škole.

Ak chcete zistiť viac o technológii Roger™ a vzdialených mikrofónoch, navštívte internetovú stránku **www.phonak.com/roger** alebo naskenujte QR kód. Vzdialené mikrofóny Roger™ sa predávajú samostatne.



*Funkciu RogerDirect™ musí do prijímačov Roger™ v načúvacích prístrojoch Phonak nainštalovať poskytovateľ načúvacích prístrojov.

15. Počúvanie na verejných miestach

Váš načúvací prístroj má možnosť indukčnej cievky (T-cievka), ktorá vám pomôže počuť na rôznych verejných miestach, ako napríklad v kostole, koncertnej sále, vlakovej stanici alebo na urade.



Keď uvidíte tento symbol, je v mieste dostupná indukčná slučka, ktorá je kompatibilná s vašim načúvacím prístrojom. So žiadosťou o ďalšie informácie a aktiváciu T-cievky sa obráťte na vášho poskytovateľa načúvacích prístrojov.

Ako používať funkciu telefónnej cievky

Prístup k funkcii T-cievky, ktorú nastavil poskytovateľ načúvacích prístrojov, je možný dvoma spôsobmi. Priamy prístup k programu T-cievky je možný po dlhom stlačení multifunkčného tlačidla na vašom načúvacom prístroji.

Prípadne je možné dostať sa do programu T-cievky cez aplikáciu myPhonak Junior. Dávajte pozor, aby ste stáli alebo sedeli vo vyhradenej oblasti systému indukčnej slučky podľa oficiálneho symbolu telefónnej cievky.

16. Prevádzka

Tento výrobok je navrhnutý tak, aby bez problémov a obmedzení fungoval pri používaní na účely, na ktoré je určený, ak v tomto návode na použitie nie je uvedené inak.

Uistite sa, že sa váš načúvací prístroj používa, prepravuje a skladuje v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

	Prevádzka	Preprava	Skladovanie
Teplota Maximálny rozsah	+5 °C až +40 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť (bez kondenzácie)	0 % až 85 %	0 % až 93 %	0 % až 93 %
Atmosférický tlak	500 až 1 060 hPa	500 až 1 060 hPa	500 až 1 060 hPa

Teplota a vlhkosť nesmie na dlhší čas počas prepravy a skladovania presiahnuť rozsahy opísané v tabuľke vyššie. Ak načúvací prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte.



17. Starostlivosť a údržba

Tieto načúvacie prístroje majú normovaný stupeň ochrany krytom IP68. To znamená, že sú odolné proti vode a prachu a navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie.

Môže sa nosiť v daždi, ale nesmú sa úplne ponoriť do vody alebo používať počas sprchovania, plávania alebo iných činností vo vode.

Tieto načúvacie prístroje sa nikdy nesmú vystaviť chlóranej vode, mydlu, slanej vode alebo iným tekutinám s obsahom chemikálií.

Ak bolo zariadenie počas skladovania a prepravy vystavené podmienkam mimo odporúčaných podmienok použitia, počkajte 15 minút a zariadenie spustíte až po dosiahnutí odporúčaných prevádzkových podmienok.

Predpokladaná životnosť:

Načúvacie prístroje majú očakávanú životnosť päť rokov. Očakáva sa, že načúvacie prístroje sú počas trvania ich používania bezpečné.

Obchodné servisné obdobie:

Dôsledná a pravidelná starostlivosť o vaše načúvacie prístroje prispeje k vynikajúcemu výkonu počas očakávanej životnosti.

Spoločnosť Sonova AG po ukončení výroby daného načúvacieho prístroja a nevyhnutných komponentov zaisťuje minimálne päťročné servisné obdobie.

Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny.

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobku sú uvedené v kapitole 24.2.

Všeobecné informácie

Pred použitím laku na vlasy alebo kozmetických prípravkov je potrebné zložiť načúvací prístroj z ucha, pretože takéto výrobky ho môžu poškodiť.

Keď načúvací prístroj nepoužívate, nechajte dvierka priehradky pre batériu otvorenú, aby sa mohla odpariť prípadná vlhkosť.

Nezabudnite načúvací prístroj po každom použití úplne vysušiť. Načúvací prístroj uchovávajte na bezpečnom, suchom a čistom mieste.

Váš načúvací prístroj je odolný voči vode, potu a nečistotám za nasledujúcich podmienok:

- Priehradka pre batériu je úplne zatvorená. Pri zatváraní priehradky pre batériu sa uistite, že v nej nie je zachytený žiaden cudzorodý predmet, napr. vlasy.
- Po vystavení pôsobeniu vody, potu alebo prachu načúvací prístroj očistite a vysušte.
- Načúvací prístroj sa používa a udržiava podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

① Používanie načúvacieho prístroja v blízkosti vody môže obmedziť prívod vzduchu k batériám, čo môže spôsobiť prerušenie funkčnosti prístroja. Ak po kontakte s vodou prestane váš načúvací prístroj fungovať, preštudujte si pokyny na riešenie problémov v kapitole 23.

Denne

Skontrolujte, či sa na koncovke a hadičke nenachádza vrstva ušného mazu a vlhkost. Povrch vyčistite handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Na čistenie načúvacieho prístroja nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť ako saponáty, mydlo a pod. Neodporúča sa oplachovanie týchto súčastí vodou, pretože by tak mohlo dôjsť k zachyteniu vlhkosti v hadičke. Ak potrebujete načúvací prístroj vyčistiť intenzívne, požiadajte svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov o radu.

Týždenne

Vyčistite koncovku mäkkou, vlhkou handričkou alebo špeciálnym čistiacim obrúskom na načúvacie prístroje. Podrobnejšie pokyny týkajúce sa údržby alebo pokyny na dôkladnejšie vyčistenie vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov.

Mesačne

Skontrolujte hadičku, či sa nej nezmenila farba, či nestvrdla alebo nepraskla. V prípade výskytu takýchto zmien sa musí hadička vymeniť. Navštívte svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov.

18. Výmena ušnej koncovky


Váš načúvací prístroj je vybavený koncovkou, ktorá môže byť továrenskou koncovkou, tvarovkou, tvarovkou SlimTip alebo univerzálnou koncovkou.

Tvarovku pravidelne kontrolujte a ak vyzerá znečistená alebo ak sa hlasitosť načúvacieho prístroja alebo kvalita zvuku zníži, vymeňte ju.


Ak sa používa továrenská koncovka, mala by sa vymieňať každé 3 mesiace. Ak sa používa tvarovka, prečítajte si kapitolu 17 tohto návodu na použitie. Ak sa používa tvarovka SlimTip, postupujte podľa pokynov v kapitole 19 pre výmenu filtra proti ušnému mazu.

18.1 Vybratie koncovky z tenkej hadičky


1. Koncovku vyberajte z tenkej hadičky tak, že tenkú hadičku chytíte do jednej ruky a koncovku do druhej.

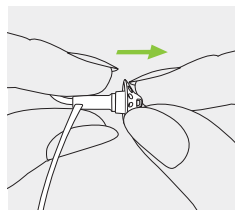

2. Opatrne potiahnite koncovku a vyberte ju.

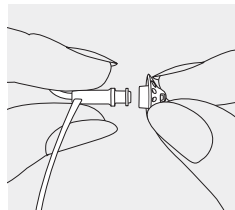


3. Tenkú hadičku vyčistite handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

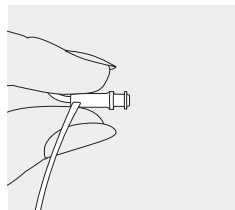

18.2 Pripojenie koncovky k tenkej hadičke


1.

Podržte tenkú hadičku v jednej ruke a koncovku v druhej.

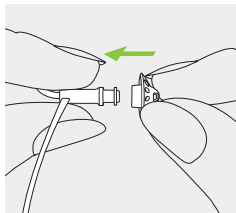


2.

Koncovku nasuňte na koniec tenkej hadičky.

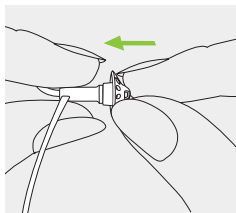

3.


Tenká hadička a koncovka by mali k sebe presne pasovať.

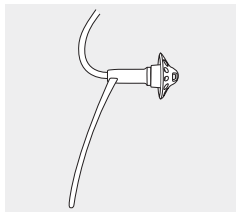

19. Výmena filtra proti ušnému mazu pri tvarovke SlimTip


1.

Vložte vyberací nástroj vidlicovým koncom do použitého filtra proti ušnému mazu. Driek držiaka by sa mal dotýkať okraja filtra.

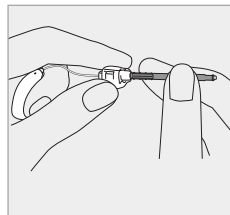


2.

Opatrne potiahnite a priamo vyberte filter von. Pri vyberaní filtra ním nekrúťte.

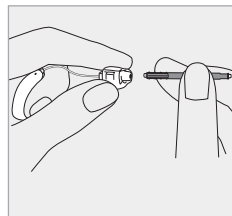


3.

Ak chcete vložiť nový filter, opatrne zatlačte vkladaciu stranu nástroja na výmenu rovno do otvoru tvarovky SlimTip, kým nebude vonkajší kruh presne priložený.

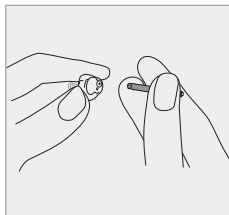

4.

Vytiahnite nástroj rovno von. Nový filter zostane na mieste.

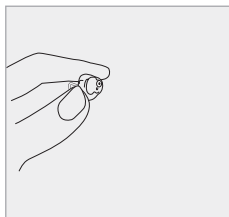

20. Servis a záruka

Platnosť záruky

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

Medzinárodná garancia

Spoločnosť Sonova AG poskytuje jednoročnú obmedzenú medzinárodnú garanciu, ktorá začína platiť odo dňa zakúpenia. Táto obmedzená garancia sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu na načúvacom prístroji, nie však na príslušenstvo, ako sú batérie, filtre, hadičky, ušné koncovky, externé prijímače. Garanciu je možné si uplatniť až po predložení dokladu o zakúpení tovaru.

Medzinárodná garancia nemá žiadny vplyv na zákonné práva, ktoré môžete mať na základe príslušnej miestnej legislatívy týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru.

Obmedzenie záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám alebo nadmerným namáhaním.

Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na príslušenstvo, ako sú batérie, filtre, hadičky, ušné koncovky, externé prijímače, ktoré podliehajú opotrebovaniu spôsobené obvyklým používaním. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené poskytovateľom načúvacích prístrojov v jeho prevádzke.

Sériové číslo (ľavá strana)

Sériové číslo (pravá strana)

Dátum zakúpenia

Poskytovateľ audio-protetických zdravotníckych pomôcok (pečiatka/podpis)



21. Informácie o zhode

Európa:

Vyhlásenie o zhode pre načúvací prístroj

Spoločnosť Sonova AG týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky nariadenia o zdravotníckych pomôckach (EÚ) 2017/745, ako aj smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je možné získať od výrobcu alebo od miestneho zástupcu značky Phonak, ktorého adresa je uvedená na internetovej stránke **www.phonak.com/en-int/certificates** (Phonak worldwide locations).

Austrália/Nový Zéland:



R-NZ

Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii.

Označenie zhody R-NZ je určené pre rádiové produkty dodávané na trh Nového Zélandu v rámci úrovne zhody A1.

Modely s bezdrôtovou technológiou uvedené na strane 2 sú certifikované podľa:

Phonak Sky L-M (L90/L70/L50/L30)

Phonak Sky L-M Trial

USA	FCC ID: KWC-ARNEM
Kanada	IC: 2262A-ARNEM

Phonak Sky L-SP (L90/L70/L50/L30)

Phonak Sky L-SP Trial

USA	FCC ID: KWC-ARNESP
Kanada	IC: 2262A-ARNESP

Poznámka 1:

Táto pomôcka vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a RSS-210 kanadského federálneho ministerstva priemyslu (Industry Canada). Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) táto pomôcka nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
- a 2) táto pomôcka musí akceptovať každé prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka 2:

Zmeny alebo úpravy tejto pomôcky, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia FCC na prevádzku tejto pomôcky.

Poznámka 3:

Táto pomôcka bola testovaná a vyhovela obmedzeniam pre digitálne pomôcky triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC a ICES-003 kanadského federálneho ministerstva pre priemysel (Industry Canada).

Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných oblastiach. Táto pomôcka vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže

spôsobíť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa takéto rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak táto pomôcka spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím pomôcky, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil toto rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi pomôckou a reproduktorom.
- Pripojte pomôcku k zásuvke v okruhu inom ako tom, ku ktorému je pripojený reproduktor.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Technická špecifikácia bezdrôtovej komunikácie vášho načúvacieho prístroja

Typ antény	Rezonančná slučková anténa
Prevádzková frekvencia	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulácia	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Vyžiarený výkon (EIRP)	< 1 mW
Bluetooth®	
Rozsah	~1 m
bluetooth	4.2 Duálny režim
Podporované profily	HFP (profil hands-free), A2DP

Elektromagnetické emisie

Vyhlasenie výrobcu: Načúvacie prístroje sú určené na použitie v elektromagnetických prostrediach uvedených nižšie. Používateľ sa musí uistiť, že ich používa v týchto prostrediach.

Test emisií	Zhoda	Odporúčanie k elektromagnetickému prostrediu
Rádiofrekvenčné emisie CISPR 11	Skupina 1	Načúvacie prístroje generujú alebo používajú rádiofrekvenčnú energiu iba na svoju internú funkciu. Preto sú rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke a nie je pravdepodobné, že spôsobia interferencie s elektronickými zariadeniami v blízkosti.
Rádiofrekvenčné emisie CISPR 11	Trieda B	Načúvacie prístroje sú vhodné na použitie v domácom prostredí a v prostredí priamo pripojeno na sieť nízkeho napätia, ktorá dodáva napätie do budov používaných na účely bývania.

Elektromagnetická odolnosť

Test odolnosti	IEC60601-1-2 Úroveň testu	Úroveň zhody
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch
Test odolnosti vyžiarého RF elektro-magnetického poľa IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM pri 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM pri 1 kHz
	9 V/m; 710, 745, 780 MHz; pulzná modulácia 18 Hz	9 V/m; 710, 745, 780 MHz; pulzná modulácia 18 Hz
	9 V/m; 5240, 5500, 5785 MHz; pulzná modulácia 217 Hz	9 V/m; 5240, 5500, 5785 MHz; pulzná modulácia 217 Hz
Blízke magnetické pole IEC 61000-4-3	27 V/m; 385 MHz; pulzná modulácia 18 Hz	27 V/m; 385 MHz; pulzná modulácia 18 Hz
	28 V/m; 450 MHz FM +/- 5 kHz odchýlka; 1 kHz sínus	28 V/m; 450 MHz FM +/- 5 kHz odchýlka; 1 kHz sínus
	28 V/m; 810, 870, 930 MHz; pulzná modulácia 18 Hz	28 V/m; 810, 870, 930 MHz; pulzná modulácia 18 Hz
	28 V/m; 1720, 1845, 1970, 2450 MHz; pulzná modulácia 217 Hz	28 V/m; 1720, 1845, 1970, 2450 MHz; pulzná modulácia 217 Hz

Test odolnosti	IEC60601-1-2 Úroveň testu	Úroveň zhody
Magnetické polia s menovitou frekvenciou napájania IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz alebo 60 Hz	30 A/m 50 Hz alebo 60 Hz
	Testovaná frekvencia 30 kHz, modulácia: CW, úroveň testu odolnosti 8	Testovaná frekvencia 30 kHz, modulácia: CW, úroveň testu odolnosti 8
Odolnosť portu krytu voči blízky magnetickým poliam IEC 61000-4-39	Testovaná frekvencia 134, 2 kHz, pulzná modulácia: 2,1 kHz, úroveň testu odolnosti 65	Testovaná frekvencia 134, 2 kHz, pulzná modulácia: 2,1 kHz, úroveň testu odolnosti 65
	Testovaná frekvencia 13,56 kHz, pulzná modulácia: 50 kHz, úroveň testu odolnosti 7,5	Testovaná frekvencia 13,56 kHz, pulzná modulácia: 50 kHz, úroveň testu odolnosti 7,5

22. Vysvetlivky k použitým symbolom



Spoločnosť Sonova AG symbolom CE potvrdzuje, že tento výrobok vrátane príslušenstva spĺňa požiadavky nariadenia 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (EÚ), ako aj smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Číslo za symbolom CE zodpovedajú kódu certifikovaných inštitúcií, s ktorými prebehli rozhovory týkajúce sa vyššie uvedeného nariadenia a smernice.



Tento symbol označuje, že výrobky opísané v tomto návode spĺňajú požiadavky pre aplikovanú časť typu B podľa normy EN 60601-1. Povrch načúvacieho prístroja je špecifikovaný ako aplikovaná časť typu B.



Udáva výrobcu zdravotníckej pomôcky, ako je definované v európskej smernici (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.



Udáva dátum výroby zdravotníckej pomôcky.



Udáva autorizovaného zástupcu v rámci Európskeho spoločenstva. Zástupca pre ES je tiež dovozca do Európskej únie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítal a zohľadnil príslušné informácie uvedené v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť príslušným výstražným upozorneniam v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol znamená, že používateľ musí venovať pozornosť relevantným varovaniam súvisiacim s batériami, ktoré sú uvedené v týchto návodoch na použitie.



Dôležité informácie pre manipuláciu a bezpečnosť výrobku.



Tento symbol označuje, že elektromagnetická interferencia zo zariadenia je nižšia než limity, ktoré schválila Federálna komisia USA pre komunikáciu.



Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii.



Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Sonova AG je licencované. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Japonská značka pre certifikované rádiové zariadenie.



Udáva sériové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať konkrétnu zdravotnícku pomôcku.



Označuje katalógové číslo výrobcu, aby bolo možné zdravotnícku pomôcku identifikovať.



Udáva, že toto zariadenie je zdravotnícka pomôcka.



Tento symbol znamená, že je dostupný elektronický návod na použitie.

IP68

Normovaný stupeň ochrany krytom. Klasifikácia IP68 udáva, že načúvací prístroj je odolný proti vode a prachu. Vydržal trvalé ponorenie v 1 metri vody na 60 minút a 8 hodín v prachovej komore podľa normy IEC60529.



Udáva teplotné limity, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.



Udáva rozsah vlhkosti, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.



Udáva rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.



Počas prepravy udržiavajte v suchu.



Tento symbol s preškrtnutým odpadkovým košom vás upozorňuje na to, že tento načúvací prístroj, ako aj batérie, sa nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu. Staré alebo nepoužívané načúvacie prístroje zlikvidujte na miestach určených na likvidáciu elektronického odpadu alebo načúvací prístroj odovzdajte na likvidáciu vášmu poskytovateľovi načúvacích prístrojov. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie.



Tento symbol udáva načúvací prístroj, ktorý nie je bezpečný na použitie v prostredí magnetickej rezonancie (MR) (napr. počas zobrazovania pomocou MR).

23. Riešenie problémov

Príčina	Možné riešenie
Problém: Načúvací prístroj piska	
Načúvací prístroj nie je správne vložený do ucha	Vložte správne načúvací prístroj (kapitola 6)
Ušný maz vo zvukovode	Obráťte sa na svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov
Problém: Načúvací prístroj je príliš hlasný	
Príliš vysoká hlasitosť	Ak je dostupný regulátor hlasitosti, znížte hlasitosť (kapitola 8)
Problém: Načúvací prístroj nie je dostatočne hlasný alebo je skreslený	
Príliš nízka hlasitosť	Ak je dostupný regulátor hlasitosti, zvýšte hlasitosť (kapitola 8)
Takmer vybitá batéria	Vymeňte batériu (kapitola 5)
Zanesená ušná koncovka	Vyčistite koncovku (kapitola 17)
Zmena stavu sluchu	Obráťte sa na svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov
Problém: Načúvací prístroj prehrá dve pípnutia	
Indikácia takmer vybitej batérie	V priebehu nasledujúcich 30 minút vymeňte batériu (kapitola 5)

Príčina	Možné riešenie
Problém: Načúvací prístroj nefunguje (žiadne zosilnenie)	
Zanesená ušná koncovka	Vyčistite koncovku (kapitola 17)
Načúvací prístroj je vypnutý	Stlačte dolnú časť multifunkčného tlačidla na 3 sekundy (kapitola 8)
Batéria úplne vybitá	Vymeňte batériu (kapitola 5)
Nesprávne vložená batéria	Vložte správne batériu (kapitola 5)
Problém: Načúvací prístroj sa nezapne	
Batéria úplne vybitá	Vymeňte batériu (kapitola 5)
Problém: Funkcia telefonického hovoru nefunguje	
Načúvací prístroj je v letovom režime	Vypnite a znova zapnite načúvací prístroj (kapitola 12.2)
Načúvací prístroj nie je spárovaný s telefónom	Spárujte ho s telefónom (kapitola 10)
Problém: Načúvací prístroj sa zapne a vypne (občasne)	
Vlhkosť na batérii alebo načúvacom prístroji	Batériu a načúvací prístroj utrite suchou tkaninou

Príčina	Možné riešenie
Problém: Kontrolka neblíká	
Vybitá batéria	Vymeňte batériu (kapitola 5)
Nesprávne vložená batéria	Vložte správne batériu (kapitola 5)
Kontrolka nie je aktivovaná	Obráťte sa na svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov

❗ Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc poskytovateľa načúvacích prístrojov.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

24. Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím načúvacieho prístroja si prečítajte príslušné bezpečnostné informácie a informácie o obmedzení používania na nasledujúcich stranách.

Určený účel použitia

Tento načúvací prístroj slúži na zosilnenie zvuku a jeho prenos do uší, čím kompenzuje zhoršený sluch.

Určená populácia pacientov

Toto zariadenie je určené pre pacientov od 0 rokov veku, ktorí spĺňajú klinickú indikáciu pre tento výrobok.

Určený používateľ

Určené pre:

- Osoby s poruchou sluchu
- Ošetrovateľa osoby s poruchou sluchu
- Poskytovateľa načúvacích prístrojov zodpovedného za nastavenie načúvacieho prístroja

Určený liečebný účel

Všeobecná klinická indikácia pre použitie načúvacích prístrojov je:

Porucha sluchu:

- Jednostranná alebo obojstranná
- Typ poruchy sluchu: prevodového typu, percepčná alebo zmiešaná
- Stupne straty sluchu
 - Sky L-M:
 - Mierna
 - Stredná
 - Sky L-SP:
 - Mierna
 - Stredná
 - Ťažká
 - Hlboká

Zdravotné kontraindikácie

Zdravotné kontraindikácie pre použitie načúvacích prístrojov sú:

- Deformácia ucha (t. j. uzatvorený zvukovod, absencia ušnice).
- Neurálna porucha sluchu (t. j. retro-kochleárne patologické zmeny, ako napríklad neprítomný/nefunkčný sluchový nerv).

- Preukázaná aktívna alebo chronická patológia stredného alebo vonkajšieho ucha, chronická drenáž alebo výtok, preukázaný chronický zápal.

Klinický prínos

- Zlepšenie počuteľnosti
- Zlepšenie porozumenia reči (hneď po osvojení jazyka)

Vedľajšie účinky

Fyziologické vedľajšie účinky načúvacích prístrojov ako tinitus, závraty, tvorba mazu, príliš veľký tlak, potenie alebo vlhkosť, pluzgiere, svrbenie a/alebo vyrážky, pocit upchatia alebo plnosti ucha a ich dôsledky ako bolesť hlavy a/alebo bolesť ucha, dokáže odstrániť alebo zmierniť váš poskytovateľ načúvacích prístrojov.

Bežné načúvacie prístroje môžu vystaviť pacientov vyšším hladinám zvuku, čo môže mať za následok posunutie prahových hodnôt frekvenčného rozsahu, ktorý je ovplyvnený akustickou traumou.

Primárne kritériá pre odoslanie pacienta na posúdenie a/alebo liečbu k lekárovi alebo inému špecialistovi sú:

- Viditeľná vrodenná deformácia ucha alebo deformácia ucha po úraze.
- Prechádzajúca aktívna drenáž ucha za posledných 90 dní.
- Anamnéza náhlejšieho alebo rýchlejšieho progresie poruchy sluchu v jednom alebo oboch ušiach počas predchádzajúcich 90 dní.
- Akútny alebo chronický závrat.
- Audiometrický rozdiel vedenia vzduch–kosť je rovný alebo väčší ako 15 dB pri frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz.
- Viditeľný dôkaz veľkého množstva ušného mazu alebo cudzie teleso vo zvukovode.
- Bolesť alebo nepríjemný pocit v uchu.
- Abnormálny vzhľad bubienka a zvukovodu, ako napríklad:
 - zápal vonkajšieho zvukovodu,
 - prepichnutý bubienok,
 - ostatné abnormality, pri ktorých sú poskytovatelia načúvacích prístrojov názoru, že sú zdravotne znepokojivé.

Poskytovateľ naúčvacích prístrojov sa môže rozhodnúť, že odporúčenie nie je vhodné alebo nie je v najlepšom záujme pacienta v týchto prípadoch:

- Ak existuje dostatok dôkazov o tom, že problém dôkladne vyšetril zdravotnícky odborník a že pacient dostal všetku dostupnú liečbu.
- Zdravotný problém sa od predchádzajúceho vyšetrenia a/alebo liečby výrazne nezhoršil ani nezmenil.

Ak sa pacient informovane a kompetentne rozhodol, že nedá na odporúčenie poradiť sa so zdravotníckym odborníkom, môžu sa odporučiť vhodné naúčvacie prístroje, pri ktorých je potrebné zohľadniť nasledovné:

- Odporúčenie nebude mať negatívny vplyv na zdravie alebo všeobecný pocit zdravia pacienta.
- Záznamy potvrdzujú, že boli zohľadnené všetky faktory v najlepšom záujme pacienta.

Ak to zákon vyžaduje, pacient podpísal vyhlásenie o vzdaní sa zodpovednosti a potvrdil, že odporúčenie neprijal a že poskytuje svoj informovaný súhlas.

Naúčvací prístroj je vhodný pre domácu zdravotnú starostlivosť a z dôvodu jeho prenositeľnosti sa môže stať, že sa bude používať v prostredí profesionálneho zdravotníckeho zariadenia, napríklad v lekárskech ambulanciách, zubných ambulanciách a pod.

Naúčvací prístroj neobnoví normálny sluch a nezabráni poruche sluchu, ktorá vznikla v dôsledku organického stavu, ani nezlepší jej stav. Občasné používanie naúčvacieho prístroja však neumožní používateľovi mať z neho plný prospech. Používanie naúčvacieho prístroja predstavuje iba časť liečby sluchu a môže byť potrebné doplniť ho o sluchový tréning a výučbu čítania z pier.

Spätná väzba, nedostatočná kvalita zvuku, príliš hlasné alebo príliš jemné zvuky, nevhodné nastavenie alebo problémy pri žutí alebo prehltaní je možné odstrániť počas procesu jemného doladenia pri nastavovaní vašim poskytovateľom naúčvacích prístrojov.

Akýkoľvek vážny incident v súvislosti s naúčvacím prístrojom je nutné nahlásiť zástupcovi výrobcu a kompetentnému orgánu v krajine pobytu. Vážny incident je popísaný ako

akýkoľvek incident, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k nasledovnému:

- a) smrť pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia.

Na nahlásenie neočakávanej činnosti alebo udalosti kontaktujte výrobcu alebo jeho zástupcu.

24.1 Upozornenia na riziká

- ⚠ Vaše načúvacie prístroje fungujú vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu skontrolujte, či letecká spoločnosť vyžaduje, aby boli zariadenia prepnuté do leteckého režimu, pozrite si kapitolu 12.
- ⚠ Načúvacie prístroje špeciálne naprogramované podľa konkrétnej poruchy sluchu môžu používať iba osoba, pre ktorú sú určené. Nemala by ich používať žiadna iná osoba, pretože si tak môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, sú zakázané. Takéto zmeny môžu poškodiť vaše ucho alebo načúvací prístroj.
- ⚠ Načúvacie prístroje nepoužívajte na miestach, kde môže dôjsť k výbuchu (bane alebo priemyselné priestory s nebezpečenstvom výbuchu, prostredia s vysokým obsahom kyslíka alebo oblasti, kde sa manipuluje s horľavými anestetikami). Toto zariadenie nie je certifikované podľa normy ATEX.

 Ak cítite bolesť v uchu alebo za uchom, ak je ucho zapálené, ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo rýchlejšiemu hromadeniu ušného mazu, poraďte sa so svojim poskytovateľom načúvacích prístrojov alebo lekárom.

 Posluchové programy v režime smerového mikrofónu znižujú hluk z pozadia. Upozorňujeme, že výstražné signály alebo zvuky prichádzajúce zozadu, napr. autá, sú čiastočne alebo úplne stlmené.

 **VAROVANIE:** Batérie v zariadení sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenia v prípade ich prehĺtnutia alebo vloženia do vnútra tela bez ohľadu na to, či je batéria použitá alebo nová! Uchováajte mimo dosahu detí, osôb s kognitívnou poruchou alebo zvierat. Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo jej vloženiu do časti tela, okamžite sa bez čakania poraďte s lekárom!

 Ak je načúvací prístroj pripojený vodičom k nastavovaciemu zariadeniu, toto zariadenie musí spĺňať bezpečnostnú normu IEC 60601-1, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.

 Po mechanickom namáhaní alebo náraze do načúvacieho prístroja skontrolujte, či je šálka načúvacieho prístroja neporušená, až potom si ho vložte do ucha.

 Nasledujúce informácie platia iba pre osoby s aktívnymi implantovanými zdravotníckymi pomôckami (t. j. kardiostimulátory, defibrilátory a pod.):

- Načúvací prístroj udržiavajte aspoň 15 cm od aktívneho implantátu. Ak pociťujete akékoľvek rušenie, načúvacie prístroje nepoužívajte a kontaktujte výrobcu aktívneho implantátu. Upozorňujeme, že rušenie môžu spôsobovať aj elektrické vedenia, elektrostatické výboje, detektory kovov na letiskách a pod.
- Magnety (napr. nástroj pre manipuláciu s batériou, magnet EasyPhone a pod.) udržiavajte aspoň 15 cm od aktívneho implantátu.

 Používanie iného príslušenstva, prevodníkov a káblov než tých, ktoré určil alebo dodal výrobca tohto zariadenia, môže viesť k zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti tohto zariadenia a nesprávnemu fungovaniu.

 Prenosné rádiový frekvenčné komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení ako anténové káble a externé antény) sa nesmú používať bližšie ako 30 cm od akejkoľvek časti načúvacích prístrojov vrátane káblov špecifikovaných výrobcom. V opačnom prípade sa môže zhoršiť výkon tohto zariadenia.

- ⚠ Pri nosení načúvacieho prístroja s ušnou koncovkou na mieru (tvarovka) sa vyhýbajte silným fyzickým nárazom do ucha. Odolnosť tvaroviek je navrhnutá na normálne používanie. Silný fyzický náraz do ucha (napr. pri športe) môže spôsobiť poškodenie/zlomenie tvarovky. To môže viesť k perforácii zvukovodu alebo ušného bubienka.
- ⚠ Je potrebné zabrániť používaniu tohto zariadenia v blízkosti iného zariadenia alebo na ňom, pretože by mohlo dôjsť k nesprávnemu fungovaniu. Ak je takéto použitie nevyhnutné, je potrebné toto aj druhé zariadenie skontrolovať a overiť, či fungujú normálne.
- ⚠ Na načúvacie prístroje sa nemajú nasadzovať továrenské koncovky/systémy ochrany pred ušným mazom, keď ich používajú zákazníci s pretrhnutými ušnými bubienkami, zapálenými zvukovodmi alebo inak odhalenými dutinami stredného ucha. V týchto prípadoch odporúčame použiť klasickú tvarovku. Ak by náhodou nejaká časť tohto produktu zostala vo zvukovode, dôrazne odporúčame vyhľadať pomoc lekára, ktorý ju bezpečne vyberie.

- ⚠ Väčšina užívateľov načúvacích prístrojov má poruchu sluchu, pri ktorej sa neočakáva zhoršenie sluchu pri každodennom pravidelnom používaní načúvacieho prístroja. Rizikom zhoršenia poruchy sluchu po dlhom nosení môže byť ohrozená len malá skupina používateľov načúvacích prístrojov.
- ⚠ Veľmi zriedkavo sa pri vyberaní načúvacieho prístroja z ucha môže stať, že továrenská koncovka, alebo cerumenálna zátka zostane vo zvukovode, ak nie je bezpečne upevnená. V tomto nepravdepodobnom prípade, že sa tento diel zasekne vo zvukovode, dôrazne odporúčame vyhľadať pomoc lekára, ktorý ho bezpečne vyberie.
- ⚠ Pre deti mladšie 36 mesiacov je nutné pripevniť bezpečnostné riešenie odnímateľných súčastí (napr. dvierok priehradky na batériu a háku), aby sa predišlo náhodnému požitiu alebo vdýchnutiu malých častí. V prípade, že jedno z týchto bezpečnostných riešení je poškodené, zariadenie je potrebné odnieť poskytovateľovi načúvacích prístrojov na opravu alebo výmenu.

⚠ Načúvaci prístroj je malé zariadenie obsahujúce drobné súčasti, ktoré sa môžu prehltnúť, vdýchnuť alebo môžu spôsobiť poškodenie mäkkého tkaniva (napr. očí). Pri prehltnutí, vdýchnutí alebo vložení do mäkkého tkaniva sa okamžite poraďte s lekárom alebo nemocnicou, pretože načúvaci prístroj alebo jeho malé časti môžu spôsobiť udusenie, vdýchnutie alebo poranenie mäkkého tkaniva.

⚠ Špeciálne lekárske alebo zubné vyšetrenie vrátane nižšie opísaného žiarenia môže nepriaznivo ovplyvniť správnu funkčnosť načúvacích prístrojov. Pred vyšetrením si ich vyberte a nechajte ich mimo vyšetrovacej miestnosti/vyšetrovacieho priestoru:

- Lekárske alebo zubné vyšetrenie s röntgenovým žiarením (vrátane snímania CT).
- Lekárske vyšetrenia s MRI/NMRI snímaním s vytváraním magnetických polí.

Načúvaci prístroj si nemusíte vyberať pri prechode cez bezpečnostné brány (letiská a pod.). Ak sa tam aj používa röntgenové žiarenie, jeho dávka bude taká nízka, že načúvacie prístroje neovplyvní.

24.2 Informácie o bezpečnosti výrobku

❗ Tieto načúvacie prístroje sú vodeodolné, no nie sú vodotesné. Sú navrhnuté, aby vydržali pri bežných činnostiach a príležitostne môžu byť vystavené extrémnym podmienkam. Načúvaci prístroj nikdy neponárajte do vody! Tieto načúvacie prístroje nie sú špeciálne navrhnuté na používanie pri dlhodobom a nepretržitom ponáraní do vody, ako napr. pri nosení počas plávania alebo kúpania. Pred takýmito činnosťami si načúvaci prístroj vždy vyberte, pretože obsahuje citlivé elektronické súčiastky.

❗ Nikdy neumývajte vstupy mikrofónov. Ak tak urobíte, môže dôjsť k strate ich špeciálnych akustických vlastností.

❗ Chráňte svoj načúvaci prístroj pred teplom a slnečným svetlom (nikdy ho nenechávajte v blízkosti okna alebo v aute). Na vysušanie načúvacieho prístroja nikdy nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iné ohrevné zariadenia. O vhodných spôsoboch vysušania sa poraďte s vašim poskytovateľom načúvacích prístrojov.

❗ Dajte pozor, aby vám načúvaci prístroj nespadol! Náraz na tvrdý povrch môže načúvaci prístroj poškodiť.

- ❗ Keď načúvací prístroj nepoužívate, nechajte dvierka priehradky pre batériu otvorenú, aby sa mohla odpariť prípadná vlhkosť. Nezabudnite načúvací prístroj po každom použití úplne vysušiť. Načúvací prístroj uchovávať na bezpečnom, suchom a čistom mieste.
- ❗ V načúvacom prístroji vždy používajte nové batérie. V prípade, že batéria vyteká, ihneď ju vymeňte za novú, aby ste predišli podráždeniu pokožky. Použité batérie môžete odovzdať svojmu poskytovateľovi načúvacích prístrojov.
- ❗ Ak načúvací prístroj nebudete dlhý čas používať, uskladnite ho v krabičke s vysušovacou tabletou alebo na dobre vetranom mieste. To umožní odparovanie vlhkosti z načúvacieho prístroja a predídete tak prípadnému ovplyvneniu funkčnosti prístroja.
- ❗ Ak načúvací prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte.
- ❗ Napätie batérií používaných v týchto načúvacích prístrojoch nesmie prekročiť 1,5 V. Nepoužívajte striebro-zinkové ani lítium-iónové (Li-ion) nabíjateľné batérie, pretože by mohli závažne poškodiť načúvacie prístroje.
- ❗ Načúvací prístroj nepoužívajte na miestach, kde sú zakázané elektronické zariadenia.
- ❗ Továrenská koncovka sa má vymieňať každé tri mesiace alebo vtedy, keď stuhne alebo skrehne. Tým sa predíde odpojeniu továrenskej koncovky od ústia hadičky pri vkladaní do ucha alebo vyberaní z ucha.

Poznámky

Poznámky

Váš poskytovateľ audio-protetických zdravotníckych pomôcok:



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Nemecko



Výrobca:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Švajčiarsko

www.phonak.com

Distibútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.

so sídlom Radlinského 27,

811 07 Bratislava

www.artsonic.sk

www.phonak.sk



029-1331-46/V1.00/2023-09/NLG © 2023 Sonova AG Všetky práva vyhradené

sonova
HEAR THE WORLD



CE
0459

